



De COVID-19 antigeentest: snel, flexibel en betrouwbaar

Voorkom onnodige verspreiding
met een test die voor
iedereen toegankelijk is

www.siemens-healthineers.com/covid-19

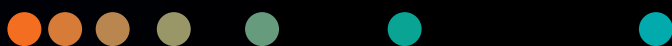

CLINITEST Rapid COVID-19 antigeentest

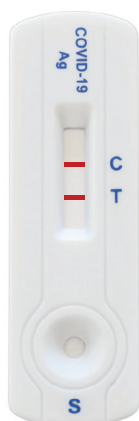

Het snel identificeren van COVID-19-patiënten is cruciaal in het bestrijden van het coronavirus. De CLINITEST Rapid COVID-19 antigeentest is eenvoudig uit te voeren en laat binnen 15 minuten het testresultaat zien. De test is CE-gemarkeerd, vereist geen apparatuur en kan op diverse locaties flexibel worden ingezet.

Een betrouwbaar testresultaat is essentieel. De klinische studie voor de CLINITEST Rapid COVID-19 antigeentest heeft 99,22% specificiteit en 96,72% sensitiviteit aangetoond. De test detecteert bovendien zeer lage concentraties van het virus en heeft een detectie-ondergrens van 115 TCID₅₀/ml.

Toepassing van de CLINITEST Rapid COVID-19 antigeentest als onderdeel van de totale teststrategie voorkomt onnodige verspreiding van het virus.



Snel

Testresultaat binnen 15 minuten



Toegankelijk


Vereist geen gespecialiseerde medewerkers of apparatuur



Schaalbaar

In grote aantallen op diverse locaties inzetbaar

Eenvoudig uit te voeren testprocedure

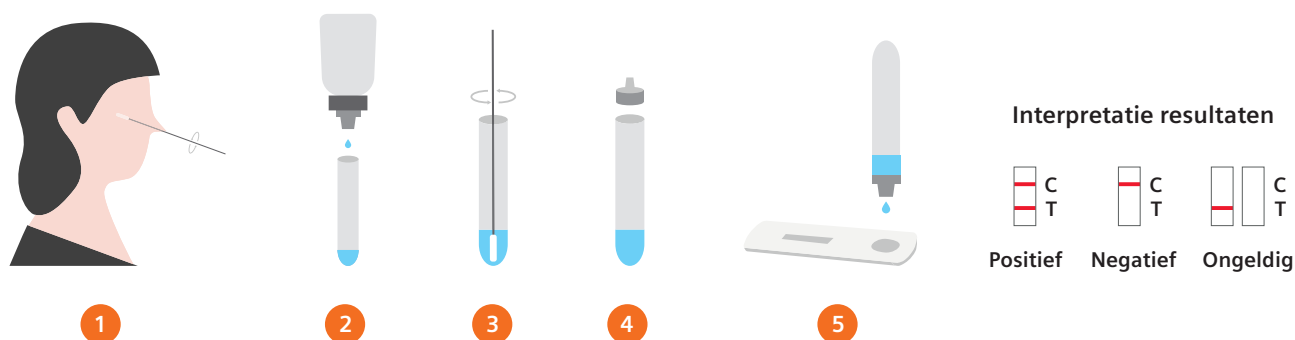

Gebruik de test niet na de vervaldatum. Breng het afgenomen materiaal en de testbenodigdheden indien nodig op kamertemperatuur (15-30°C) en gebruik de juiste, persoonlijke beschermingsmiddelen.

1. Veeg over het oppervlak van de posterieure nasopharynx en draai de swab voorzichtig een aantal keer en verwijder de swab voorzichtig.
2. Plaats de extractiebuis rechtop in de houder en voeg tien druppels (0,3 ml) extractiebuffer toe.
3. Rol de swab minstens 6 keer in de buis, knijp van buitenaf in de extractiebuis, laat 1 minuut staan en knijp nog een paar keer.
4. Verwijder de swab en gooi deze weg. Plaats de bijgeleverde druppeldop op de extractiebuis.
5. Leg de testcassette plat en voeg 4 druppels (~ 0,1 ml) vloeistof met afgenomen materiaal toe in de sample opening. Lees het resultaat na 15 minuten af.

Gebruikte materialen moeten als biologisch afval worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Prestaties

Sensitiviteit: 96,72%
Specificiteit: 99,22%
Nauwkeurigheid: 98,74%
Klinische studiegegevens: 317 proefpersonen
De tests, uitgevoerd door de producent (op diverse locaties, klinische omgevingen en gebruikers), toonden data van hoge kwaliteit.

Bijgeleverde materialen per testkit

20 testcassettes
2 flacons extractiebuffer
20 steriele swabs
20 extractiebuisen en druppeldopjes
1 extractiebuis houder
1 bijsluiters

Specificaties

Testtijd: 15 minuten
Type afnamemateriaal: nasofaryngeaal
Opslag: kamertemperatuur of gekoeld (2-30° C).
Houdbaarheid: 24 maanden vanaf productiedatum

CLINITEST is een handelsmerk van Siemens Healthcare Diagnostics Inc. of de gelieerde bedrijven. Alle andere handelsmerken en merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. De beschikbaarheid van de producten kan per land verschillen en is onderworpen aan diverse wettelijke vereisten. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor beschikbaarheid. Voor aanvullende specificaties en prestatiegegevens, raadpleeg de gebruiksaanwijzing.